


Oticon Opn

Willkommen in der **Wireless Welt**

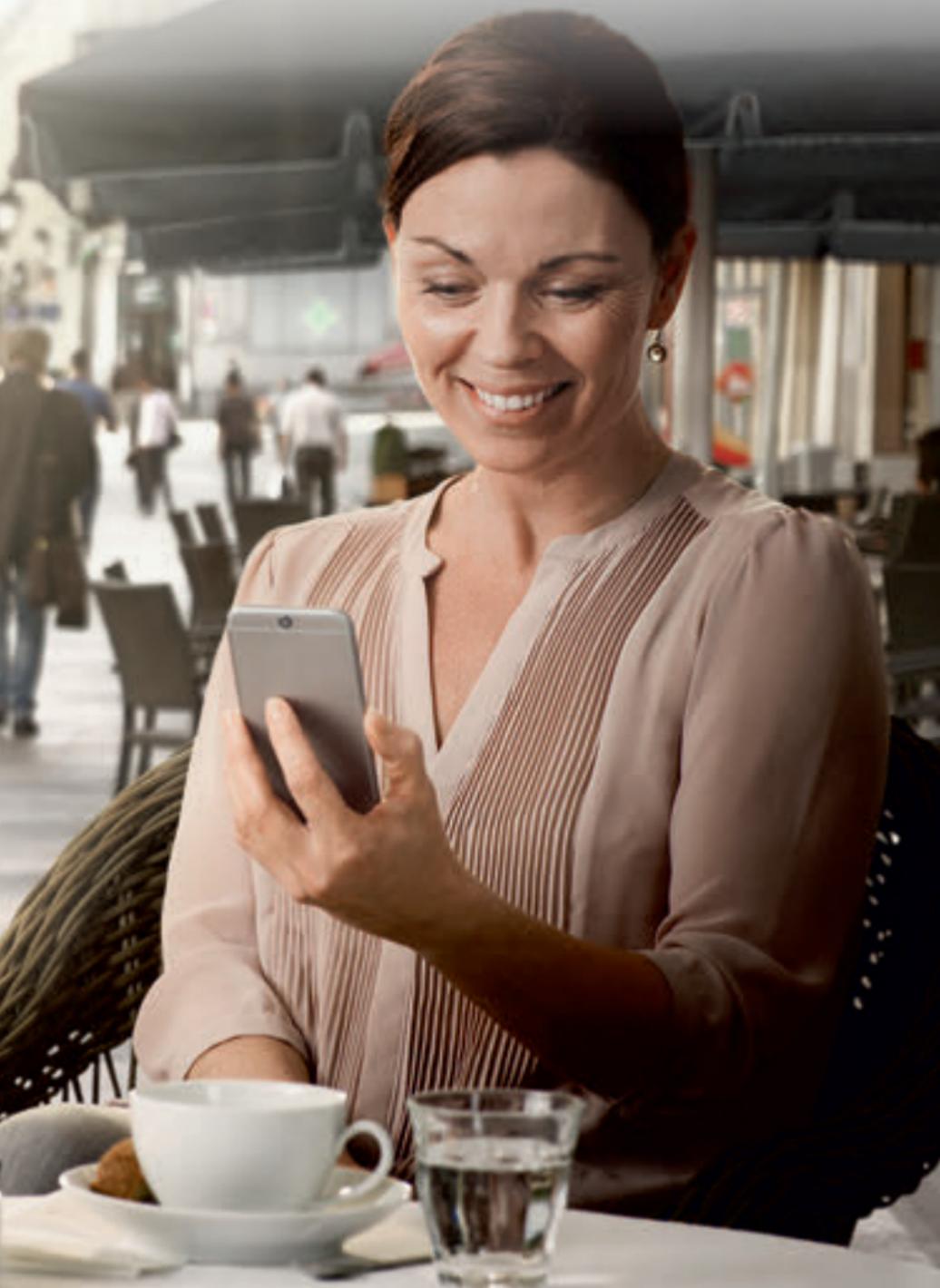

oticon
PEOPLE FIRST

Nutzen Sie das volle Potenzial von **Oticon Opn™**

Mit Oticon Opn genießen Sie ein neues Hör-Erlebnis. Diese Hörgeräte zeichnen sich durch einen natürlichen und klaren Klang aus. Sie nehmen wieder ganz beiläufig wahr, was um Sie herum passiert und können Unterhaltungen mit mehreren Personen – auch in Lärm – leichter meistern.

In dieser Broschüre erfahren Sie, wie Sie darüber hinaus mit Oticon Opn zum Beispiel besonders einfach telefonieren, ganz entspannt Musik hören oder fernsehen können.

Nutzen Sie dazu das Oticon Opn Wireless-Zubehör, das einfach und intuitiv zu bedienen ist.



Fernbedienung



Oticon ON App

Genießen Sie dieses wunderbare Gefühl von Mobilität: einfach Ihre Oticon Opn Hörgeräte über die Oticon ON App mit dem iPhone® oder Android™-Smartphone verbinden und Lautstärke oder Hörprogramme bequem mit einem Fingerwisch steuern. Die Oticon ON App bietet Ihnen zum Beispiel auch eine Verbindung zur Bedienungsanleitung und enthält Tipps für den Umgang mit einer Hörminderung.

Einfach die Gratis-App im App Store® oder bei Google Play™ herunterladen und los geht's.



Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPad und iPod sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.



TV Adapter



ConnectClip



Einfaches Telefonieren



Kompatibel mit
**allen modernen
Smartphones**

Oticon Opn und iPhone

Oticon Opn ist ein Made for iPhone® Hörgerät. Wenn Sie ein iPhone® nutzen, können Sie Ihre Oticon Opn Hörgeräte ganz einfach damit verbinden – kabellos und ohne weiteres Zubehör. So können Sie Ihren Gesprächspartner direkt in beiden Hörgeräten hören. Ihre Hörgeräte werden in Kombination mit dem iPhone®, dessen Mikrofon Sie nutzen, zum kabellosen Headset.

Oder Sie genießen Musik bzw. Audiodateien von Ihrem iPhone®, iPad® oder iPod touch® in Stereoklang direkt in beiden Hörgeräten.

Wenn Sie freihändig mit dem iPhone® telefonieren möchten, können Sie den ConnectClip nutzen.

Made for



Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPad und iPod sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Oticon Opn und Android-Smartphones

Ihre Hörgeräte können sich über den ConnectClip mit jedem modernen Android™-Smartphone* kabellos verbinden. Der ConnectClip leitet das Telefongespräch direkt in beide Hörgeräte. Das in den ConnectClip eingebaute Mikrofon überträgt deutlich, was Sie dem Anrufer sagen. Der ConnectClip verwandelt Oticon Opn Hörgeräte in ein hochwertiges kabelloses Headset und ermöglicht Ihnen neben dem Telefonieren auch das Übertragen von Musik und Audiodateien.



Sie können den ConnectClip u. a. als Fernbedienung für die Hörgeräte zum Einstellen der Lautstärke und zum Wechseln der Programme nutzen.



Android ist ein Warenzeichen der Google Inc. Der Android-Roboter wird anhand von Werken reproduziert bzw. verändert, die von Google erstellt oder geteilt wurden. Seine Verwendung erfolgt gemäß den Bestimmungen der Creative Commons 3.0 Attribution License.

*Android™-Smartphones mit Bluetooth 2.1 (ab 2010)



Entspannt fernsehen oder Musik hören

Mit dem TV Adapter 3.0 können Sie den Fernsehton in Stereo direkt in Ihre Hörgeräte übertragen. Der große Vorteil: Sie sehen in Ihrer Lieblingslautstärke fern und werden nicht durch Umgebungsgeräusche gestört. Andere Zuschauer können die TV-Lautstärke unabhängig einstellen. Natürlich können Sie den TV Adapter auch mit zahlreichen Audiogeräten verbinden. Entsprechende Kabel gehören zum Lieferumfang.

Egal ob TV oder Musik: Ihre Oticon Opn Hörgeräte werden mit dem TV Adapter zu kabellosen Stereo-„Kopfhörern“.



Die Hörgeräte per Fernbedienung steuern

Mit der Fernbedienung Remote Control 3.0, die kaum größer ist als ein moderner Autoschlüssel, können Sie die Oticon Opn Hörgeräte unauffällig und bequem per Knopfdruck steuern, um beispielsweise die Lautstärke zu regeln oder auf ein anderes Hörprogramm umzuschalten.

Alternativ können Sie auch die Fernbedienungs-funktion der Oticon ON App oder des ConnectClips nutzen.





Verstehen auf Entfernung

Auch mit den besten Hörgeräten kann es manchmal schwierig sein zu verstehen, was jemand sagt – zum Beispiel bei einem Vortrag oder in einer extrem lauten Umgebung. Der ConnectClip kann Sprache kabellos direkt in Ihre Hörgeräte übertragen.

So funktioniert es z. B. bei einem Vortrag:

- Geben Sie den ConnectClip an die vortragende Person weiter, die Sie besser verstehen möchten.
- Der ConnectClip leitet die Stimme des Sprechers direkt in Ihre Hörgeräte weiter.
- Sie hören den Vortrag ohne von Umgebungsgeräuschen gestört zu werden.



Bis zu 20 m



Chatten über den PC

Der ConnectClip ist auch ideal für eine Unterhaltung via PC. In Kombination mit Ihren Hörgeräten können Sie wie mit einem kabellosen Headset kommunizieren.

So funktioniert es beim Chatten über den PC:

- Verwenden Sie den ConnectClip, um Sprache kabellos in Ihre Hörgeräte zu übertragen, zum Beispiel beim Chatten über Skype.
- Ihre Stimme wird über das im ConnectClip integrierte Mikrofon übertragen.



Bis zu 10 m



Wir empfehlen für diese Funktion, dass Sie den ConnectClip über den Sennheiser BTD 800 USB-Netzwerkadapter mit Ihrem PC koppeln. Dieser USB-Adapter ist im Fachhandel erhältlich.





Verbinden Sie sich mit dem Internet

Oticon Opn ist das weltweit erste Hörgerät, das sich über die Oticon ON App mit Geräten und Dienstleistungen des Alltagslebens verknüpfen lässt.

Wie wäre es, wenn Ihre Hörgeräte Sie informieren, wenn es an der Tür klingelt, wenn der Feueralarm anspringt, wenn der Backofen fertig ist oder sich das Babyphone meldet? Oder wenn das Licht und die Kaffeemaschine angehen, wenn Sie morgens Ihre Hörgeräte einschalten? Möglich macht das der Internetdienst **If This Then That** – IFTTT (www.ifttt.com). Oticon hat sich der IFTTT-Gemeinschaft angeschlossen, der immer mehr Firmen beitreten.

Profitieren Sie jetzt und in Zukunft von dieser Vernetzung.

Einfach die Oticon ON App herunterladen und die vielfältigen Möglichkeiten entdecken, wie Sie Ihr Leben mit Oticon Opn leichter gestalten können!

Willkommen in der Wireless Welt

Ihr Hörakustiker informiert Sie gerne über die Vernetzungsmöglichkeiten, die Ihnen die neue Technologie von Oticon Opn bietet.

Ihr Akustiker:



www.oticon.de

oticon
PEOPLE FIRST