

Phonak Marvel™ Wireless-Zubehör

Produktinformation



Der Phonak TV Connector ist eine leicht bedienbare Plug-and-Play-Lösung für Phonak Marvel Hörgeräte. Ausgestattet mit der von Phonak entwickelten AirStream™ Technologie liefert diese Lösung eine sehr gut bewertete Klangqualität für Streaming über TV- und Multimedia-Geräte. Darüber hinaus sorgt die benutzerfreundliche Phonak Remote App – erhältlich für iOS und Android Smartphones – dafür, dass die Nutzer noch mehr aus Ihren Marvel Hörgeräten herausholen können.

TV Connector – Der benutzerfreundliche Streamer zum Fernsehen und Musik hören



Der **TV Connector** ist eine Plug-and-Play-Schnittstelle zu TV-Geräten und anderen Audioquellen und unterstützt die direkte Wireless-Anbindung von Phonak Marvel Hörgeräten. Als Audio-Streamer lässt er sich leicht installieren sowie bedienen und dank der AirStream™ Technologie bietet er herausragende Klangqualität in Stereo. Der TV Connector kann Audiosignale über eine Distanz von bis zu 15 Metern an eine unbegrenzte Anzahl an verbundenen Zuhörern übertragen.


Funktionen

- Streaming an beide Hörgeräte in Stereo-Qualität
- Die AirStream Technologie bietet herausragende Klangqualität, minimale Übertragungsverzögerung und eine einfachere Anbindung
- Mit nur einem Tastendruck werden alle kompatiblen Hörgeräte innerhalb der Reichweite verbunden - ohne am Hörgerät etwas einstellen zu müssen
- Gleichzeitiges Streaming an eine unbegrenzte Anzahl an Nutzern
- Unauffällige Anbringung hinter dem Fernseher möglich

Kompatibilität

- Der TV Connector ist mit allen Phonak Hörgeräten mit direkter Wireless-Anbindung kompatibel.

Verwendung

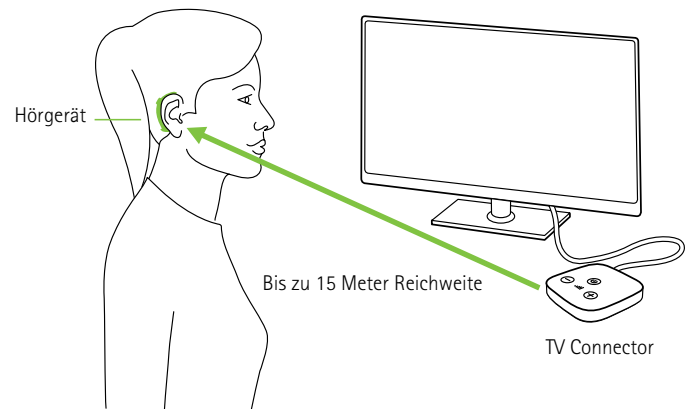

Anleitungsvideos zur Einrichtung und Nutzung des TV Connector finden Sie unter: www.phonakpro.de/tvconnector

Technische Daten



- 1 Connect-Taste
- 2 Statusanzeige (LED)
- 3 micro-USB Netzeingang
- 4 Audioeingang für Toslink (digital optisch) oder 3,5 mm Klinkestecker (analog)
- 5 Power-Taste
- 6 Tasten zur Erhöhung und Reduzierung der Lautstärke (Kalibrierung)

Kleine Gehäusegröße (L: 63 mm x B: 63 mm x H: 12 mm)

Phonak Remote App – die neue Fernsteuerungs-App




Mit der leicht anwendbaren **Phonak Remote App** stellen Ihre Kunden ihre Hörgeräte ganz einfach ein – direkt über ihr Smartphone. Sie benötigen kein zusätzliches Gerät.


Funktionen

- Lautstärkeeinstellung der Hörgeräte – für beide Seiten oder individuell für jede Seite
- Liste der verfügbaren Hörprogramme mit direkter Programmwahl
- Möglichkeit zur Umbenennung der verfügbaren Hörprogramme in der App
- Auswahl der mit den Hörgeräten verbundenen und verfügbaren Audioquellen
- Einfache Anpassung der Streaming-Balance des Hörgeräts während des Streamings einer Audioquelle
- Separate Einstellung der Intensität des Tinnitus Balance Noisers, sofern im Hörgerät verfügbar
- Anzeige der durchschnittlichen Tragezeit der mit der App verbundenen Hörgeräte
- Akku-Stand (nur bei Hörgeräten mit Lithium-Ionen-Akku)
- Konfiguration für automatisches Einschalten (Auto-On) nach der Entfernung aus dem Ladegerät (nur bei Hörgeräten mit Lithium-Ionen-Akku)


Anleitungsvideos zur Einrichtung und Nutzung der Phonak Remote App auf Ihrem Telefon finden Sie unter: www.phonakpro.de/remoteapp

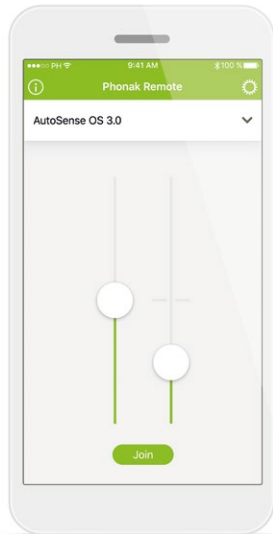


Separate Lautstärkeeinstellung auf jeder Seite

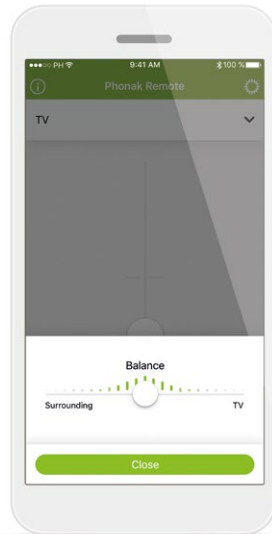

Streaming-Balance einer Audioübertragung

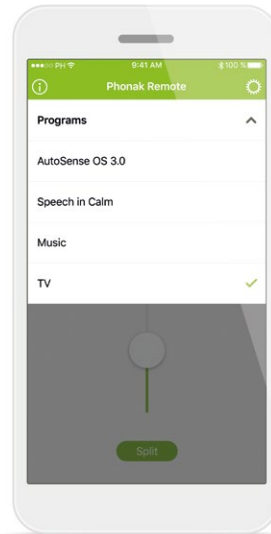

Programmwahl und Einstellungen

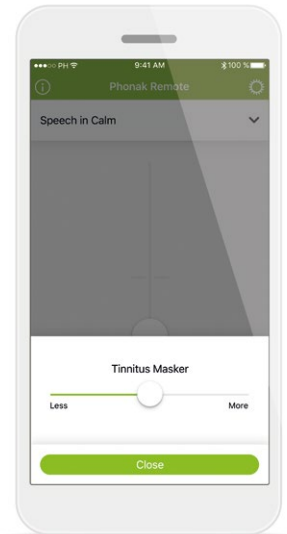

Tinnitus Noiser Intensität

Kompatibilität

- Die Phonak Remote App ist kompatibel mit Phonak Hörgeräten mit Bluetooth®-Konnektivität.
- Die Phonak Remote App kann auf Mobiltelefonen mit Bluetooth® Low-Energy (BLE) verwendet werden und ist mit iPhone 5s oder neueren Geräten kompatibel, die iOS ab Version 10.2 nutzen.
- Die Phonak Remote App kann auf von Google Mobile Services (GMS) zertifizierten Android Geräten verwendet werden, die Bluetooth 4.2 und Android OS ab 6.0 verwenden.

Apple, das Apple Logo, iPhone und iOS sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Android, Google Play und das Google Play Logo sind eingetragene Marken von Google Inc.

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.

Life is on

Gutes Hören bedeutet Lebensqualität. Deshalb widmen wir uns bei Phonak seit mehr als 70 Jahren der Entwicklung wegweisender Hörlösungen. Damit ermöglichen wir es jedem, sich sozial und emotional frei zu entfalten und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Life is on.

www.phonak.de