

# HÖRLUCHS HEARING GmbH & Co. KG

## FIRMENSITZ

Bergseestraße 10, 91217 Hersbruck, Deutschland

## LIEFERADRESSE WAREN & AUFTRÄGE

Friedrich-Köchert-Str. 4, 91217 Hersbruck, Deutschland

TEL: +49(0) 9151 / 90 886 -0

FAX: +49(0) 9151 / 90 886 -27

MAIL: [info@hoerluchs.com](mailto:info@hoerluchs.com)

WEB: [www.hoerluchs.com](http://www.hoerluchs.com)

# HÖRLUCHS®



MADE IN GERMANY

## BENUTZERINFORMATION FÜR DIE HÖRLUCHS-PRODUKTE SOWEI SLEEP (IIC), SOWEI AQUA (SPORT) & SOWEI SURF

### RICHTIGES EINSETZEN DER OTOPLASTIK:

Ihr persönlicher Komfortschutz **HÖRLUCHS SOWEI SLEEP, SOWEI SLEEP IIC, SOWEI AQUA, SOWEI AQUA SPORT** oder **SOWEI SURF** ist mit einer Seitenmarkierung gekennzeichnet. Die rechte Otoplastik mit „R“, die linke mit „L“. **Bitte achten Sie darauf, dass das Produkt stets in das richtige Ohr eingesetzt wird.**

Greifen Sie Ihr HÖRLUCHS-Produkt stets zwischen Daumen und Zeigefinger und beginnen Sie mit dem rechten Gehörschutz. Setzen Sie den Gehörgangszapfen des Produkts in den Ohrkanal.

Mit leichtem Drehen nach vorne führen Sie es in die Ohrmuschel ein. In manchen Fällen wird das Einsetzen durch leichtes Ziehen am Ohrläppchen erleichtert. Vergewissern Sie sich, dass sich die Otoplastik in die obere Ohrfalte (bei Concha-Produkten) einfügt.

### BITTE BEACHTEN SIE:

Achten Sie regelmäßig darauf, dass das Produkt keine Beschädigungen aufweist und stets voll funktionstüchtig ist. Vermeiden Sie ein bewusstes Überdehnen des Silikonmaterials. Wir empfehlen eine regelmäßige Überprüfung durch den Hörakustiker.

## ACHTUNG:

**Die oben genannten Produkte sind nicht als Gehörschutz geprüft und zugelassen! Eine Verwendung als PSA (persönliche Schutzausrüstung) ist demnach nicht zulässig.**

Um Ihr Ohr wirkungsvoll vor gefährlichem und schädlichem Lärm zu schützen, benutzen Sie bitte stets einen Gehörschutz mit Baumusterprüfung!

## BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

Ihr Produkt dient zur Erhöhung des Komforts bei störenden Geräuschen oder zum Schutz vor eindringendem Spritzwasser (bei korrekter Anpassung und Anbringung). **Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß und daher nicht zulässig!**

## AUFBEWAHRUNG & REINIGUNG

Bewahren Sie Ihr persönliches HÖRLUCHS-Produkt bei Nichtgebrauch stets im mitgelieferten Etui auf.

**Reinigen Sie Ihr Produkt regelmäßig.** Hierzu empfehlen wir unser auriFIX Reinigungsspray mit Bürste. Auch Wasser und milde Seife können verwendet werden. Nach vollständigem Trocknen bewahren Sie Ihre Otoplastik bitte im mitgelieferten Schutzetui auf. Dieses Produkt kann durch bestimmte chemische Substanzen leiden. Weitere Angaben können vom Hersteller angefordert werden.

Wird die Otoplastik an einem trockenen, sauberen Ort gelagert und die Hinweise zur Aufbewahrung und Pflege berücksichtigt, ist eine Lagerdauer von fünf Jahren, ab Fertigungsdatum gegeben. Das Fertigungsdatum finden Sie auf der Etuirückseite. Bei Transport und Lagerung liegt der empfohlene Temperaturbereich zwischen 0°-35° C. **Eine Lagerung bei mehr als 55° C ist nicht zulässig!**